



Extra Medical

info@extramedical.com - www.extramedical.com

1130, rue Lévis (Suite 2), Terrebonne, Québec. J6W-5S6

Tel : 450-416-1753 Fax : 450-416-3039

Mode d'emploi des coussinets de lit sans fil SMART GBT-W1 et GCT-W1

Par mesure de sécurité, remplacez le coussinet après un an d'utilisation.

Ce coussinet fonctionne avec les moniteurs de gestion de chute sans fil. Les coussinets ainsi que les moniteurs sans fil n'ont aucun câble de raccordement n'entre eux. La technologie du coussinet sans fil " En instance de brevet " Utilise un émetteur, situé dans le manchon du coussinet pour communiquer avec le moniteur en utilisant une technologie sans fil " En instance de brevet ".

Mise en garde : Le fabricant ne prétend d'aucune manière que ce dispositif empêchera les chutes et/ou les fugues des utilisateurs.

Prenez avis que ce coussinet est un modèle courant et non un modèle avec horloge interne. Ce coussinet fonctionne normalement avec les moniteurs de la série "*Change pad indicator*". Toutefois, l'indicateur "*change pad*" ne vous avisera pas à la fin de la garantie du coussinet.

Le système "*change pad*" est conçu pour fonctionner avec un coussinet avec horloge interne. Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter au : 1-866-386-2776

MISE EN FONCTION

1. Insérez les batteries dans le moniteur sans fil de gestion de chute SMART. Avec l'émetteur à portée de la main appuyer sur le bouton " Program situé à l'arrière du moniteur. Le moniteur fera entendre 3 "Beep" pour indiquer que le moniteur est en mode programmation et la lumière " in use" sera allumée
2. Activer l'émetteur. Le moniteur émettra une longue tonalité indiquant que la programmation est terminée. Réinsérer l'émetteur dans le manchon du coussinet.
3. Appliquez une pression sur le coussinet sans fil afin d'activer le moniteur sans fil. Le moniteur émettra deux "Beep" indiquant que le moniteur et le coussinet sont en fonction. La lumière "in use" clignotera tant qu'une pression est maintenue sur le coussinet. Quand toute la pression sur le coussinet est relâchée, le moniteur émettra un signal d'alarme, appuyer sur le bouton "Reset" pour arrêter l'alarme.
4. Quand le coussinet à besoin d'être remplacé, enlever l'émetteur du manchon du coussinet. Glisser le curseur de l'émetteur en position "Off" Entreposer l'émetteur jusqu'au moment de s'en servir avec un nouveau coussinet sans fil.
5. Par mesure de sécurité, pour la stabilité du coussinet de lit, le fabricant recommande le système de fixation optionnel.



Extra Medical

info@extramedical.com - www.extramedical.com

1130, rue Lévis (Suite 2), Terrebonne, Québec. J6W-5S6

Tel : 450-416-1753 Fax : 450-416-3039

ENTRETIEN

Lors de l'utilisation du coussinet avec un sur matelas de mousse ou de gel, toujours s'assurer du bon fonctionnement du système.

Pour minimiser les risques d'infection, il est recommandé d'utiliser un coussinet neuf pour chaque patient.

Le nettoyage des coussinets peut être fait avec une lingette désinfectante ou un nettoyant anti-bactérien.

Ne pas plier le coussinet.

Ne pas immerger le coussinet dans un liquide ou une solution nettoyante.

Ne pas exposer le coussinet à de hautes températures, ne pas l'insérer dans un stérilisateur.

DÉPANNAGE

1. Vérifier la lumière " Pad signal " sur le moniteur. La lumière " Status / in use " doit clignoter indiquant que le coussinet fonctionne normalement. Quand le système est en fonction et la lumière " Check pad " clignote le coussinet peut être hors de portée du moniteur environ 7 mètres de distance où la batterie de l'émetteur peut-être faible.
2. Assurez-vous que le curseur de l'émetteur est à la position " On " et que le voyant rouge clignote à toute les 20 secondes, ceci indique que l'émetteur fonctionne normalement, Si le voyant ne clignote pas contacter votre distributeur.
3. Vérification la source d'alimentation de votre moniteur. Si vous utilisez une batterie. Si l'émetteur émet une tonalité et le voyant " Low battery " est allumé changer la batterie. Si vous utilisez un adaptateur A/C assurez-vous que l'adaptateur est bien branché au moniteur et que votre prise murale est fonctionnelle.
4. Si le problème persiste contacter votre distributeur. Ayez en main le moniteur et le coussinet et l'émetteur au moment de le contacter.

MISE EN GARDE

Le fait de ne pas se conformer à la mise en garde peut mener a des accidents pouvant aller jusqu'au décès de l'utilisateur.

Ce dispositif ne convient pas à tous les individus. D'autres dispositifs pourraient être nécessaires. Ce dispositif ne peut pallier à une surveillance visuelle. Le fabricant ne prétend d'aucune manière que ce dispositif empêchera les chutes et/ou les fugues.

Les coussinets ainsi que les moniteurs peuvent être sujets à des bris. Assurez-vous que l'utilisateur ne peut s'empêtrer ni s'étrangler avec le cordon. Ce dispositif est conçu pour aider les intervenants dans un programme de gestion de chute. Vérifiez ce dispositif avant chaque usage. Prenez connaissance du mode d'emploi et de l'avis légal avant chaque utilisation.



Extra Medical

info@extramedical.com - www.extramedical.com

1130, rue Lévis (Suite 2), Terrebonne, Québec. J6W-5S6

Tel : 450-416-1753 Fax : 450-416-3039

AVIS LÉGAL

Les coussinets ainsi que les moniteurs de la compagnie SMART CAREGIVER CORPORATION sont conçus pour être installés par l'utilisateur. De ce fait, il incombe entièrement à l'utilisateur de s'assurer que l'installation ainsi que les vérifications soit conformes. Ce dispositif n'a pas pour but de remplacer une supervision du personnel. Il nécessite en plus et sans se limiter à :

- a) Une supervision du patient
- b) Une formation adéquate du personnel dans la gestion des chutes et des fugues
- c) Une vérification du produit avant chaque utilisation

Le vendeur limite sa responsabilité au remboursement ou au remplacement des produits.

Le vendeur se dégage de toute responsabilité compensatoire ou tout autre dommage pouvant surgir suite à l'utilisation des produits.

GARANTIE LIMITÉE

Le vendeur certifie le produit contre tout défaut de fabrication et cela pour la durée de la garantie stipulée sur le coussinet et cette garantie prendra effet à la date d'achat. Le vendeur ne peut offrir d'une manière implicite une garantie autre que cette garantie limitée.

Aucune affirmation, soit par des actes, paroles ou énoncés du vendeur ne peut constituer une garantie. La performance du produit après l'installation incombe à l'acheteur. Si le produit s'avérait défectueux, seul l'acheteur assumera les frais d'installation, service ou réparation et non le manufacturier, le distributeur ou le détaillant.

Fabriqué par : Smart Caregiver Corporation
1229N. Mc Dowell Blvd Petaluma California 9495