

# ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

## MAXI SKY<sup>440</sup>

LE NOUVEAU SYSTÈME ULTRA-LÉGER  
DE LÈVE-MALADE SUR RAIL




...with people in mind

# UNE SOLUTION PORTATIVE POUR UNE FLEXIBILITE MAXIMALE

Les systèmes de lève-malade sur rail constituent une méthode éprouvée pour manipuler les résidents en toute sécurité et en respectant leur dignité d'une manière qui minimise aussi les risques de blessures liées au travail du soignant.

Le nouveau *Maxi Sky<sup>440</sup>* ultra léger est un système de lève-malade su rail portatif facile à utiliser qui permet à un seul soignant d'exécuter des transferts à l'aide d'une télécommande, et cela sans stress ni effort, et sans levage manuel. Comme il est facile de se déplacer autour de ce système, et de l'attacher rapidement à un portique, ce système portatif peut être mis en place rapidement chaque fois qu'il faut manipuler le patient. Le *Maxi Sky<sup>440</sup>* est le choix idéal pour les établissements de soins où la flexibilité est une priorité majeure.

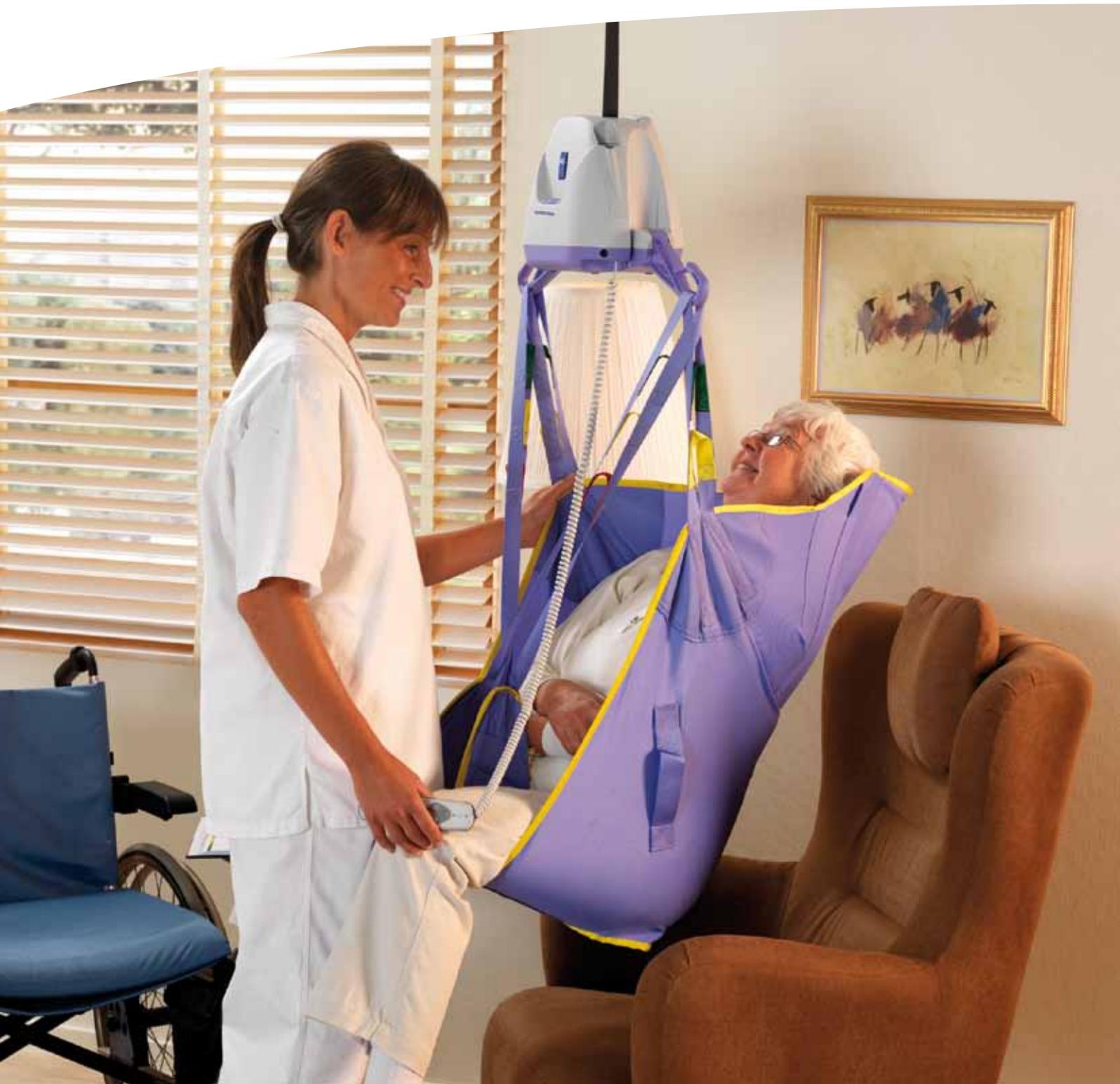

# LE MEILLEUR LEVE-MALADE PORTATIF TOUJOURS DISPONIBLE POUR LE SERVICE



## Portique ou rail permanent ?

Un portique autonome (Easy Track FS), comme celui illustré ci-dessus, constitue une solution optimale lorsqu'un rail permanent n'est pas requis. Le portique léger en aluminium est facile à assembler. Il suffit d'encliqueter les différentes parties les unes dans les autres – et une simple échelle d'alignement incorporée garantit que les pieds du portique sont correctement positionnés. L'installation de rails permanents ce qui peut aussi comprendre des plaques tournantes et des rails en H, est beaucoup plus rapide que les méthodes classiques et cela grâce aux attaches Kwiktrack à un modèle de support révolutionnaire et breveté.



## Parfaitement portable

Le lève-malade portable sur rail conjugue les principales caractéristiques d'un système fixe et les avantages d'une flexibilité maximale. Equipée d'une poignée et pesant à peine 6,35kg, la cassette de levage est très facile à déplacer. Il est aussi compacte grâce à ses crochets escamotable pour l'accrochage des harnais. Mais sa portabilité n'entraîne aucune concession sur sa capacité. Le *Maxi Sky<sup>440</sup>* peut soulever des patients d'un poids de 200 kg, ce qui en fait le système de transfert idéal pour la plupart des patients inaptes à la déambulation.



## Aller aux toilettes

Le *Maxi Sky<sup>440</sup>* peut être utilisé pour de nombreuses manipulations du patient que l'on doit faire quotidiennement, y compris aller aux toilettes. Ce programme peut être effectué de manière très simple et dans la dignité, le résidant étant confortablement soutenu par un harnais de toilette. L'illustration ci-dessus montre un transfert en douceur entre le fauteuil et les toilettes à l'aide d'un portique (Easy Track FS).

## Fonctionnement sans a-coups

Les boutons de la télécommande situés sur le devant de la cassette sont facilement accessibles. Les fonctions démarrage et arrêt progressifs permettent au soignant de s'assurer que le lève-malade peut toujours être arrêté sans à-coups, en toute sécurité et exactement à la position requise.

## Dispositif de sécurité intégré

En cas d'urgence, divers dispositifs tels que frein, système de descente manuel et arrêt d'urgence, garantissent la sécurité du résidant. Un limiteur de courant empêche l'utilisation du lève-malade si la pile est déchargée.

## Entretien simple

Le remplacement des batteries est facile. Il suffit de disposer d'un tournevis. Un indicateur rouge sur le lève-malade avertit le soignant qu'il faut effectuer l'entretien de l'appareil. En raison de sa conception modulaire, il suffit d'encliqueter les composants de rechange pour les mettre en place.

## Gamme complète de harnais

Il existe une gamme complète de harnais à boucles prévus pour le berceau mobile à 2 points. Les crochets du harnais largement espacés rendent les transferts plus confortables pour le résidant.

## Crochet tarzan


Grâce à l'utilisation d'une sangle supplémentaire appelée le crochet Tarzan, les transferts entre les systèmes de rail ou les chambre se font facilement et en douceur.

## Sur rail

Le rayon serré des sections de rail incurvé-es permet de prévoir des configurations en utilisant l'espace disponible au maximum. Les sections de rails s'encastrent les unes dans les autres à l'aide d'un système exclusif de verrouillage à goupilles. Des raccords sans soudeure assurent le déplacement sans à-coups du résidant pendant le transfert.

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## Espace requis

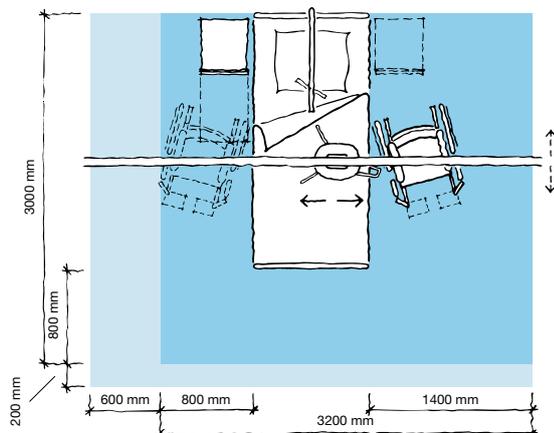

- La zone bleu indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel puisse utiliser les accessoires mécanisés de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique le prolongement de la superficie de travail requis pour faciliter les activités à partir des deux côtés afin d'avoir un accès adéquat pour le résident, les accessoires mécanisés et l'aide-soignant.

Le *Maxi Sky<sup>440</sup>* fait partie de la gamme complète de lève-malade *Maxi Sky* d'ArjoHuntleigh qui comprend également le modèle 600, un lève-malade pour une utilisation permanente et le modèle 1000, un lève-malade sur rail pour obèses.

## Mobilithèque

Convient à Doris et à Emma



**D Doris**, qui est incapable de se soutenir seule

**E Emma**, qui est pratiquement grabataire et totalement dépendante

Pour plus d'informations, contactez ArjoHuntleigh et demandez la plaquette Mobilithèque™.

## Information produit

Capacité de charge 200 kg

Poids de l'appareil (piles comprises) 6.35 kg

Voyant LED signalant le besoin d'entretien

Commande motorisée électronique à microprocesseur des fonctions de démarrage et d'arrêt progressifs

Dispositif de descente d'urgence manuelle (situé sur le boîtier du moteur)

Boutons électriques de levage et de descente d'urgence

Dispositif d'arrêt d'urgence (bouton-poussoir) accessible au-dessous de l'appareil

Voyant de faible charge de pile (sonore et LED visuelle)

Voyants de charge - clignotement jaune : en charge  
- jaune permanent : charge terminée

Boîtier ABS FR (ignifuge)

Frein d'urgence, fonctionne de la même façon qu'une ceinture de sécurité automobile

Longueur de sangle jusqu'à 2,2m testée pour un poids de 1363,6kg

Vitesse de levage : 4,3 cm/s

Piles : 2 piles de 2,3 Ah nécessitent en moyenne de 2 à 4 heures pour une charge complète ou 30 transferts à 80 kg

Certifications CSA N° 601.1, UL N° 2601-1

Marquage CE / ISO 10535

### Chargeur

Voyant sous tension sur module de charge

100-240 V c.a./ 50-60 Hz / 27 Va

Isolement de 2ème catégorie

### Télécommande

ABS ignifuge

Boutons à effleurement Santopren / IP44

Seules les pièces détachées ArjoHuntleigh, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires ArjoHuntleigh. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis.

® et ™ sont des marques commerciales appartenant au groupe de sociétés ArjoHuntleigh.  
© ArjoHuntleigh, 2011.

# ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

[www.ArjoHuntleigh.com](http://www.ArjoHuntleigh.com)

**GETINGE GROUP** est un fournisseur mondial de premier plan en produits et systèmes contribuant à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et de la biologie. Nous regroupons nos activités sous les trois marques **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** et **MAQUET**. **ArjoHuntleigh** se consacre à la mobilité des patients et au traitement des plaies. **GETINGE** propose des solutions de lutte contre les infections dans les soins de santé et de prévention de la contamination en biologie. **MAQUET** se spécialise dans les traitements et produits destinés aux interventions chirurgicales et aux soins intensifs.

### ArjoHuntleigh SAS

2 avenue Alcide de Gasperi BP 133

59436 Roncq CEDEX, FRANCE

Tél. : 03 20 28 13 13

Fax : 03 20 28 13 14

E-mail : [info.france@arjohuntleigh.com](mailto:info.france@arjohuntleigh.com)

[www.ArjoHuntleigh.fr](http://www.ArjoHuntleigh.fr)

### ArjoHuntleigh SA

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Tél.: +32 (0)53 60 73 80

Fax: +32 (0)53 60 73 81

E-mail: [info@ArjoHuntleigh.be](mailto:info@ArjoHuntleigh.be)

[www.ArjoHuntleigh.be](http://www.ArjoHuntleigh.be)